

schülke →



Koncentrát na báze aktívneho kyslíka v práškovej forme na dezinfekciu a čistenie plôch a povrchov zdravotníckych pomôcok

perform® pro

Naše plus

- výborná materiálová kompatibilita
- vhodné na epidemiologické situácie
- bez farbív a parfumácie

Oblasť použitia

perform® pro is suitable for disinfecting surfaces and medical devices. Through the enhancement of a very well-established product with a broad spectrum of activity and high material compatibility, perform® pro can be used in all hospital areas. In addition, the product has been improved so that it also meets the current requirements of the Biocidal Products Regulation.

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucidny, tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny, sporicídny. Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Na prípravu pracovného roztoku naplňte vedierko vodou (max. 30 °C), pridajte prípravok a rozpustite:

- 1 vrecko (40 g) na 8 l vody = 0,5% roztok
- vrecká (80 g) na 8 l vody = 1% roztok

Prípravené pracovné roztoky majú stabilitu 24 hodín (pri 25 °C) a zaručujú stabilitu účinnej látky. V prípade silnej kontaminácie by mal byť pracovný roztok vymenený skôr. Dezinfekcia povrchov: Naneste pracovný roztok v požadovanej koncentrácii na podlahu stieraním v dvoch krokoch.. Zdravotnícke prostriedky a iné povrchy utrite navlhčenou utierkou. Aby ste zabránili tvorbe reziduí, mala by na povrchu po druhom stieraní zostať iba

minimálna zvyšková vlhkosť. Pred dezinfekciou sa uistite, že sú odstránené všetky viditeľné nečistoty.

Zloženie

100 g obsahuje 45 g pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Ďalšie zloženie: sodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonát sodný, dodecylsulfát sodný, kyselina vínna.

Špeciálne odporúčania

Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

V prípade silného znečistenia vopred vymeňte pracovný roztok. Pracovný roztok môže mať bieliaci účinok na niektoré veľmi citlivé textilné farbivá. Recyklujte iba úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu je možné zlikvidovať s domovým odpadom. Zaisťte dostatočné vetranie v mieste použitia.

Len na profesionálne použitie. Akékoľvek závažné incidenty súvisiace s produktom je nutné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu.

Informácie pre objednávku

Položka	Množstvo v balení	GTIN	Položka č.
perform pro (250x) 40 g BT	250 / Kartón	4032651985180	70003655
perform pro -PL,CZ,SK- 900 g DS	4 / Kartón	4032651985272	70003659

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába produkty ekonomicky a s využitím pokročilých, bezpečných a ekologických výrobných procesov a zároveň si zachováva vysoké štandardy kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



schülke -+

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Mostenická 3
971 01 Prievidza | Slovakia
Telefón +421 46 549 45 87
www.schulke.sk
schulkesk@schulke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefón +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom oprávnenia výrobcu podľa § 13 ods. 1 nemeckého zákona o liekoch a certifikátov o dodržiavaní GMP pre lieky